

Med hjälp av en Högfrekvens maskin med ozonkan man behandla och förebygga akne genom att syresätta huden och producerar en antiseptisk effekt. Hög frekvens stimulerar även blodcirkulationen och cellmetabolism för yngre hy.

Genom växelström aktiveras ett glasrör (elektrod) fylld med argon eller neon gas. Denna ström skapar vibrationer i vattenmolekylerna i huden och bildar en värmeeffekt, tillsammans med ozon.

Till skillnad från andra elektriska hudbehandlingar, kan högfrekvens maskin användas på bar hud, men kan även användas över gasväv eller produkt för att bättre kunna glida över huden. Görs behandlingen på rätt sätt är den inte smärtsam.

Instruktioner:

1. Placera önskad elektrod i den handhållna staven.
2. Slå på maskinen och justera effektinställningen efter kundens komfortnivå.
3. Placera pekfingeret på glaselektroden. Ta inte bort fingret förrän elektroden är i kontakt med kundens hud. Tas fingret bort för tidigt, kan en obehaglig gnista skapas uppstå på kundens hud.
4. För elektroden över ansiktet med cirkulära rörelser. Upprätthåll kontinuerlig kontakt med huden. Börja med pannan, flytta sedan ner elektroden till näsa, kinder och haka. Behandla ansiktet under 3-5 minuter.
5. Placera ett finger på elektroden innan du för elektroden från ansiktet.
6. Stäng av strömbrytaren. Rengör elektroden med en antiseptisk lösning. Obs! Doppa aldrig elektroden i vatten! Torka elektroden torr med en ren handduk.

Be kunden att avlägsna smycken och andra metallföremål innan behandlingen.

Använd inte HF på hud som är röd eller inflammerad, på gravida kvinnor och personer med högt blodtryck, hjärtproblem, pacemakers eller epilepsi. Under behandlingen skapas en skarp doft av ozon. Detta är normalt.

